

Safeflow

NADELFREIES INFUSIONSSYSTEM

ANWENDUNG



1

Wischen Sie das Safeflow mit einem Alkoholtupfer* und lassen Sie das Desinfektionsmittel gut trocknen.

*Hygienerichtlinien Ihres Hauses beachten



2

Setzen Sie die Spritze auf bzw. schliessen Sie die Infusionsleitung direkt an das Safeflow-Ventil an und drehen Sie im Uhrzeigersinn. Das Safeflow-Ventil öffnet sich erst, wenn die Spritze bzw. die Infusionsleitung angeschlossen ist. Applizieren Sie die Lösung.



3

Wenn Sie mit Verlängerungsleitungen arbeiten, schliessen Sie die Klemme, bevor die Spritze entfernt wird. Lassen Sie konnectierte Luer-Steck-Spritzen nicht unbeaufsichtigt.



4

Um die Spritze bzw. die Infusionsleitung abzunehmen, drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn. Safeflow schliesst sich automatisch, sobald die Spritze bzw. die Leitung dekonnectiert wird. Keine sterile Verschlusskappe erforderlich.



ANWENDERVORTEILE

- Einfache Desinfektion durch Alkoholtupfer
- Kompatibel mit Luer-Steck- und Luer-Lock-Ansätzen
- Ermöglicht häufigen Zugang für die direkte Aspiration oder Medikamenteninjektion
- Passend zu allen IV-Systemen