

Safeflow

SYSTÈME DE PERFUSION SANS AIGUILLE

ACCESSOIRES DE PERFUSION



1 Essuyez le dispositif Safe-flow avec un tampon imbibé d'alcool (conformément aux directives d'hygiène de votre établissement) et laissez bien sécher le désinfectant.



2 Connectez la seringue – ou directement la tubulure de perfusion – à la valve Safeflow, puis tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre. La valve Safeflow ne s'ouvre que lorsque la seringue ou la ligne de perfusion est fixée. Administrez la solution.



3 Si vous utilisez des tubulures de rallonge, fermez la pince à tubulure avant de retirer la seringue. Ne laissez pas de seringue fixée par connexion Luer (assemblage par emboîtement) sans surveillance.



4 Pour retirer la seringue ou la tubulure connectée, tournez dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Le dispositif Safeflow se ferme automatiquement dès que la seringue ou la tubulure en est déconnectée. L'utilisation d'un capuchon stérile n'est pas nécessaire.



AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

- Désinfection aisée avec un tampon imbibé d'alcool
- Compatible avec les embouts Luer et Luer-Lock
- Permet un accès fréquent pour l'aspiration directe ou l'injection de médicaments
- Compatible avec tous les systèmes IV