

Intrafix® SafeSet Flush


Infusionssystem für eine optimierte Medikamentenapplikation

1. VORBEREITEN DER HAUPTLEITUNG



1. Infusionsbesteck auspacken. Überprüfen, ob Belüftungsklappe geschlossen und Rollenklemme geöffnet ist.
2. Intrafix® SafeSet Flush in das Behältnis einstecken.
3. Rollenklemme schliessen.
4. Befüllen Sie die Tropfkammer bis zum grünen Ring. Dazu das Tropfkammerunterteil 2 – 3 x kräftig zusammendrücken.
5. Die Rollklemme öffnen und die Leitung vollständig entlüften. Die PrimeStop-Kappe ermöglicht das automatische Befüllen des Infusionssystems und somit ein zeitsparendes und hygienisch sauberes Arbeiten.

2. KONNEKTION DER SEKUNDÄRLEITUNG

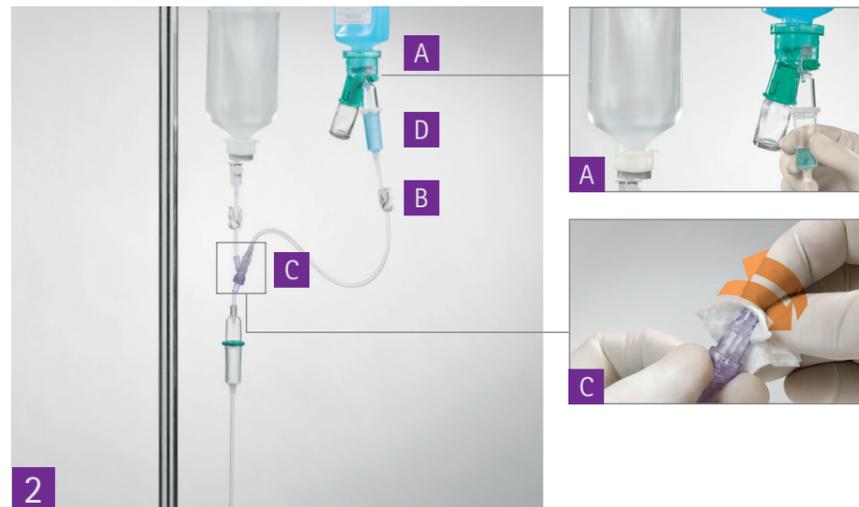

- A Stechen Sie die Intrafix® Primeline Sekundärleitung in das Medikamentenbehältnis ein.
- B Schliessen Sie die weisse Klemme der Sekundärleitung.
- C Desinfizieren Sie das nadelfreie Membranventil Caresite® am Intrafix® SafeSet Flush und konnektieren Sie die Sekundärleitung.
- D Befüllen Sie die Tropfkammer bis zum weissen Ring.


Hinweis: Ein Entlüften der Intrafix® Primeline Sekundärleitung ist nicht notwendig.

3. START DER MEDIKAMENTEN-APPLIKATION



1. Schliessen Sie die weisse Klemme des Intrafix® SafeSet Flush (Hauptleitung).
2. Öffnen Sie dann die weisse Klemme der Intrafix® Primeline Sekundärleitung.
3. Regulierung der Durchflussrate über die Rollenklemme.

4. ENDE DER APPLIKATION & ENTSORGUNG DES SYSTEMS

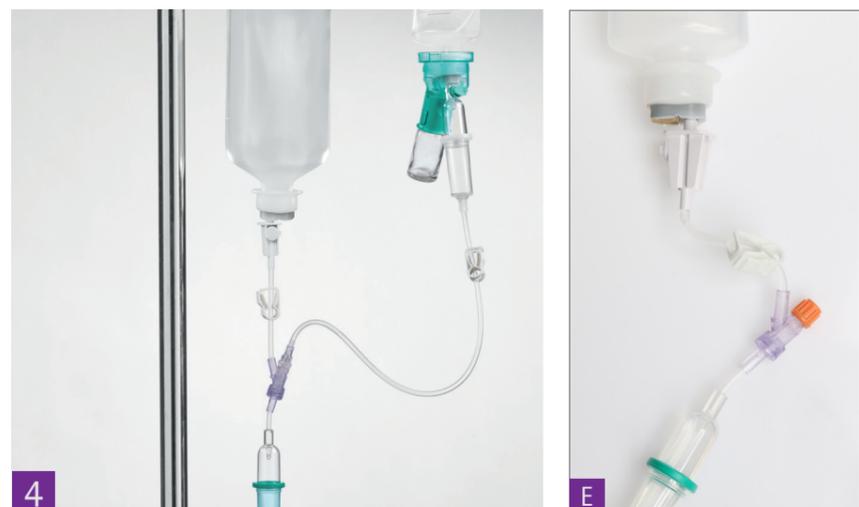

- A Nachdem das Medikament vollständig appliziert wurde, schliessen Sie die weisse Klemme der Sekundärleitung. Die Tropfkammer läuft komplett leer.
- B Öffnen Sie die weisse Klemme der Hauptleitung.
- C Spülen Sie die Hauptleitung nach jeder Medikamentenapplikation bzw. am Therapieende mit der Grundinfusion.
- D Dekonnektieren und entsorgen Sie die Intrafix® Primeline Sekundärleitung.
- E Konnektieren Sie eine SwapCap® Desinfektionskappe bis zur nächsten Medikamentengabe.