

Intrafix® SafeSet Flush


Systeme de perfusion pour une application medicamenteuse optimisee

1. PREPARATION DE LA LIGNE PRINCIPALE



1. Deballer le set de perfusion. Verifier si le clapet d'aeration est ferme et la pince a roulette est ouverte.
2. Introduire Intrafix® SalesSet Flush dans le recipient.
3. Fermer la pince a roulette.
4. Remplissez le goutte-à-goutte jusqu'à l'anneau vert. Pour cela presser 2 à 3 fois fermement la partie inferieure du goutte-à-goutte.
5. Ouvrir la pince a roulette et aerer completement la ligne. Le capuchon PrimeStop permet le remplissage automatique du systeme de perfusion et ainsi un gain de temps et un travail hygienique et propre.

2. CONNEXION DE LA LIGNE SECONDAIRE

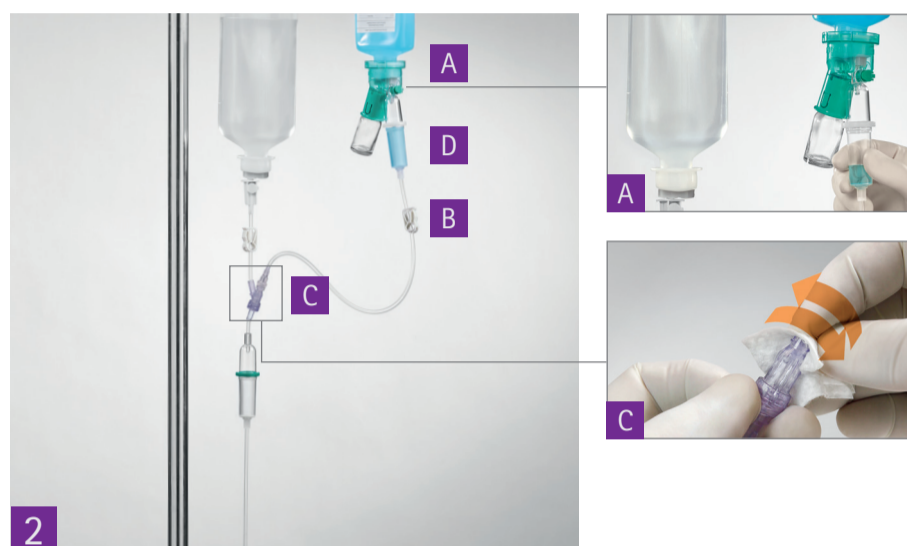

- A Introduisez la ligne secondaire Intrafix® Primeline dans le recipient a medicaments.
- B Fermez la pince blanche de la ligne secondaire.
- C Désinfectez la soupape membrane sans aiguilles Caresite® Intrafix® SafeSet Flush et connectez la ligne secondaire.
- D Remplissez le goutte-à-goutte jusqu'à l'anneau blanc.

Remarque : l'aeration de la ligne secondaire Intrafix® Primeline n'est pas necessaire.

3. DEMARRAGE DE L'APPLICATION MEDICAMENTEUSE



1. Fermez la pince blanche d'Intrafix® SafeSet Flush (ligne principale).
2. Ouvrez alors la pince blanche de la ligne secondaire Intrafix® Primeline.
3. Regulation du debit a travers la pince a roulette.

4. FIN DE L'APPLICATION ET VIDANGE DU SYSTEME



- A Apres avoir applique completement le medicament, fermez la pince blanche de la ligne secondaire. Le goutte-à-goutte se vide completement.
- B Ouvrez la pince blanche de la ligne principale.
- C Rincez la ligne principale apres chaque application du medicament, respectivement a la fin de la therapie avec la perfusion de base.
- D Déconnectez et videz la ligne secondaire Intrafix® Primeline.
- E Connectez une cape de desinfection SwapCap® jusqu'à la prochaine application de medicaments.