

AESFULAP®

Endoscopic Technology

Consignes d'entretien des instruments chirurgicaux

Avant tout contrôle de fonctionnement, les pièces mobiles (p. ex. articulations, clés) des instruments chirurgicaux, tels que les pinces, ciseaux ou porte-aiguilles, doivent être lubrifiées aux endroits indiqués à l'aide de l'huile d'entretien adaptée à la méthode de stérilisation employée.

Veillez tenir compte des instructions de préparation fournies dans le mode d'emploi. Vous pouvez consulter les instructions de préparation et d'utilisation à tout moment sur notre Extranet : <https://extranet.bbraun.com>



Procédure

- Laissez le produit refroidir à température ambiante.
- Lubrifiez légèrement les pièces mobiles (p. ex. articulations et clés) à l'aide de l'huile d'entretien adaptée à la méthode de stérilisation employée (p. ex. **huile en spray AESFULAP® STERILIT® JG600** ou **huile en spray AESFULAP® STERILIT® JG598**).
- Retirez l'excédent d'huile à l'aide d'une lingette non pelucheuse.
- Après chaque nettoyage et désinfection, contrôlez le produit sur les points suivants : **propreté, fonctionnement et altérations**, p. ex. isolation, pièces desserrées, tordues, cassées, fissurées, usées ou brisées.
- Vérifiez la compatibilité avec les produits correspondants.
- Retirez immédiatement le produit endommagés et faites intervenir un service de réparation qualifié (de préférence du fabricant).

Exemple d'application pour l'huilage du porte-aiguille Pt. 1 – 4 :



N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou information complémentaire :

Aesculap Service-Center

Tél. : 0848 83 00 22

Tél. direct : 041 58 258 76 71

e-mail : repair-aesculap.ch@bbraun.com