

AESCULAP®

Endoscopic Technology

Pflegehinweise Chirurgische Instrumente

Chirurgische Instrumente wie z. B. Klemmen, Scheren, Nadelhalter, sind an den beweglichen Teilen (z. B. Gelenke, Schlüsse) vor der Funktionsprüfung mit dem für das angewendete Sterilisationsverfahren geeigneten Pflegeöl an gekennzeichneten Stellen zu ölen. Bitte beachten Sie jeweils die Angaben zur Aufbereitung in der Gebrauchsanweisung. Sie können jederzeit die aktuellen Aufbereitungs- und Gebrauchsanleitungen in unserem Extranet abrufen: <https://extranet.bbraun.com>



Vorgehen

- Produkt auf Raumtemperatur abkühlen lassen.
- Bewegliche Teile (z. B. Gelenke und Schlüsse) mit dem für das angewendete Sterilisationsverfahren geeigneten Pflegeöl leicht ölen (z. B. **AESCULAP® STERILIT® Ölspray JG600** oder **AESCULAP® STERILIT® Ölspray JG598**).
- Überschüssiges Öl mit einem fusenfreien Tuch entfernen.
- Produkt nach jeder Reinigung und Desinfektion prüfen auf: **Sauberkeit, Funktion und Beschädigung**, z. B. Isolation, lose, verbogene, zerbrochene, rissige, abgenutzte und abgebrochene Teile.
- Kompatibilität mit den zugehörigen Produkten prüfen.
- Beschädigtes Produkt sofort aussortieren und einen qualifizierten Reparaturservice (sinnvollerweise des Herstellers) einsenden.

Anwendungsbeispiel für Ölung des Nadelhalters Pkt. 1 – 4:



Bei weiteren Fragen und Unklarheiten kontaktieren Sie uns unter:

Aesculap Service-Center

Tel.: 0848 83 00 22

Tel. direkt: 041 58 258 76 71

E-Mail: repair-aesculap.ch@bbraun.com