

AESFULAP® Endoscopic Technology

Istruzioni per la manutenzione degli strumenti chirurgici

Gli strumenti chirurgici quali ad es. pinze, forbici, porta aghi devono essere lubrificati nei punti contrassegnati delle parti mobili (ad es. giunzioni, chiusure) con l'olio protettivo compatibile con la procedura di sterilizzazione utilizzata, prima del test funzionale. Osservare le indicazioni sul ricondizionamento contenute nelle istruzioni per l'uso. È possibile accedere in qualsiasi momento alle istruzioni aggiornate per il ricondizionamento e per l'uso, sulla nostra extranet: <https://extranet.bbraun.com>



Procedura

- Lasciar raffreddare il prodotto a temperatura ambiente.
- Lubrificare delicatamente le parti mobili (ad es. giunzioni, chiusure) con l'olio protettivo compatibile con la procedura di sterilizzazione utilizzata (ad es. **AESFULAP® STERILIT® Spray lubrificante JG600** o **AESFULAP® STERILIT® Spray lubrificante JG598**).
- Rimuovere l'olio in eccesso con un panno privo di lanugine.
- Dopo ogni pulizia e disinfezione, controllare il prodotto per verificare: **pulizia, funzionamento e danni**, ad es. isolamento, parti allentate, piegate, rotte, incrinare, usurate e spezzate.
- Verificare la compatibilità con i prodotti associati.
- Scartare immediatamente il prodotto danneggiato e inviarlo a un servizio di riparazione qualificato (possibilmente del fabbricante).

Esempio di applicazione per l'oliatura dei punti 1 - 4 del portaaghi:



Aesculap Service-Center

Tel.: 0848 83 00 22

Tel. diretto: 041 58 258 76 71

E-Mail: repair-aesculap.ch@bbraun.com