






Präzisionstropfenregler Schwerkraftinfusionen

Produktmerkmale:

- Zahlenwerte auf der Skala vereinfachen das Einstellen der gewünschten Flussrate (Alternative zu Rollenklemme).
- Komplett mit Infusionsgerät Intrafix® Air erhältlich.
- Konstante Flussrate über längere Infusionsdauer.
- Einhandbedienung möglich.
- Kein Nachstellen der Flussrate nötig dank schlauchunabhängiger Einstellung am Regler.
- Schiebeklemme für die kurzzeitige Unterbrechung der Infusion.
- Druckbeständig (bis 0,5 bar).
- Öse am Handgriff dient als Schlauchhalterung.

Gebrauchsanweisung:

1. Einstellrad des Reglers in beide Richtungen drehen, um die Ur sprungspositon zu lösen. Regler auf «0» stellen, Schiebeklemme in offenem Zustand.
2. Infusion wie üblich vorbereiten. Infusionsgerät Intrafix® Air mit geschlossener Euroklappe in Infusionsbehälter einstecken.
3. Flüssigkeitsspiegel in Tropfammer einstellen und Euroklappe der Dornbelüftung öffnen. Regler auf «max.» einstellen und das Infusionsgerät luftblasenfrei füllen.
4. Schutzkappe des Luer-Lock-Ansatzes entfernen. Anschluss zum Patienten herstellen.
5. Gewünschte Flussrate, retrograd von Position «max.» ausgehend, auf der Markierung am Handgriff einstellen (Die Skalenwerte gelten als indikative Werte und müssen je nach Dichte der Flüssigkeit überprüft werden).

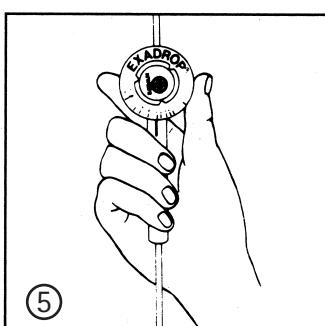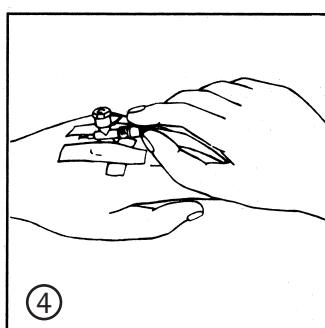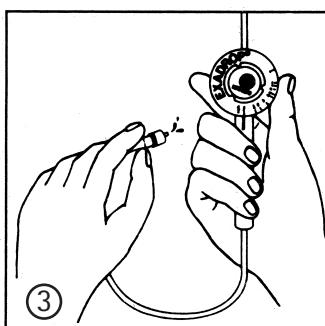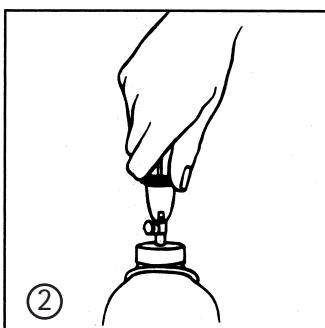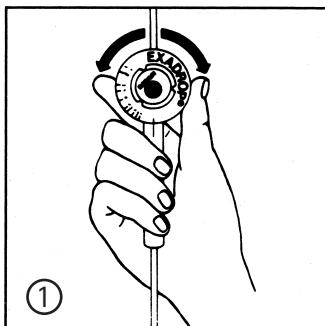

Régulateur de débit de précision pour perfusions par gravité

Description du produit:

- La graduation facilite le réglage du débit souhaité (alternative à la roulette de réglage).
- En vente complet avec perfuseur Intrafix® Air.
- Débit constant sur une longue période de temps.
- Dispositif manœuvrable d'une seule main.
- Le fonctionnement du régulateur est indépendant de la tubulure.
- Clamp pour interruption brève de la perfusion.
- Résistance à la pression (jusqu'à 0,5 bar).
- L'ergot sur la poignée permet de clipser une tubulure.

Mode d'emploi:

1. Manœuvrer le disque de réglage dans les 2 directions. Placer le régulateur sur la position 0. Clamp en position ouverte.
2. Préparer la perfusion comme habituellement. Le clapet (Euro) étant fermé, introduire le perforateur de l'Intrafix® Air dans le flacon de soluté.
3. Remplir la chambre compte-gouttes au deux tiers et ouvrir le clapet Euro. Positionner le régulateur sur «max.» et purger l'ensemble du perufseur.
4. Retirer le capuchon (protecteur de stérilité) de l'embout luer lock. Connecter le perufseur à l'abord vasculaire du patient.
5. Régler sur l'Exadrop® le débit en partant de la position «max.» (Les valeurs indiquées sur la graduation sont approximatives et doivent impérativement être contrôlées en fonction de la densité du liquide).