






### Präzisionstropfenregler Schwerkraftinfusionen

#### Produktmerkmale:

- Zahlenwerte auf der Skala vereinfachen das Einstellen der gewünschten Flussrate (Alternative zu Rollenklemme).
- Komplett mit Infusionsgerät Intrafix® Air erhältlich.
- Konstante Flussrate über längere Infusionsdauer.
- Einhandbedienung möglich.
- Kein Nachstellen der Flussrate nötig dank schlauchunabhängiger Einstellung am Regler.
- Schiebeklemme für die kurzzeitige Unterbrechung der Infusion
- Druckbeständig (bis 0,5 bar).
- Öse am Handgriff dient als Schlauchhalterung.

#### Gebrauchsanweisung:

1. Einstellrad des Reglers in beide Richtungen drehen, um die Ursprungsposition zu lösen. Regler auf «0» stellen, Schiebeklemme in offenem Zustand.
2. Infusion wie üblich vorbereiten. Infusionsgerät Intrafix® Air mit geschlossener Euroklappe in Infusionsbehälter einstecken.
3. Flüssigkeitsspiegel in Tropfkammer einstellen und Euroklappe der Dornbelüftung öffnen. Regler auf «max.» einstellen und das Infusionsgerät luftblasenfrei füllen.
4. Schutzkappe des Luer-Lock-Ansatzes entfernen. Anschluss zum Patienten herstellen.
5. Gewünschte Flussrate, retrograd von Position «max.» ausgehend, auf der Markierung am Handgriff einstellen (Die Skalenwerte gelten als indikative Werte und müssen je nach Dichte der Flüssigkeit überprüft werden).

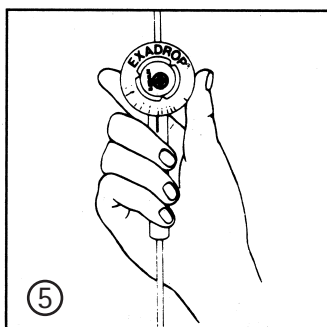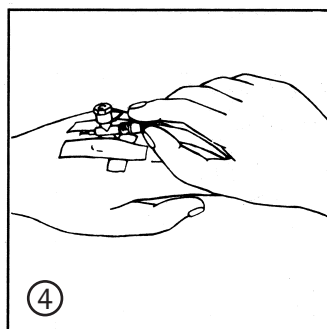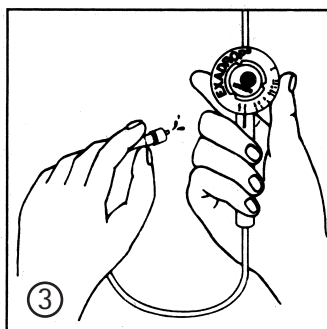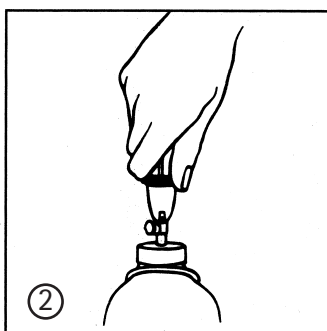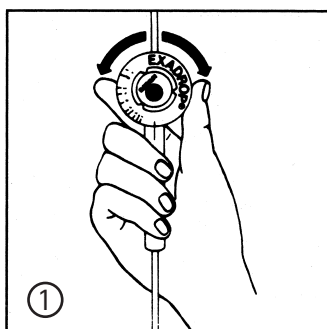

### Regolatore di flusso di precisione per infusioni a gravità

#### Descrizione del prototipo:

- I valori numerici sulla scala facilitano la regolazione della portata desiderata (alternativa alla valvola a rotella bloccafusso).
- Completo di gocciolatore per infusione Intrafix® Air.
- Portata costante per durata prolungata di infusione
- facilità d'uso.
- Senza postregolazione della portata grazie alla registrazione indipendente dal tubo flessibile sul regolatore.
- Bloccata per breve tempo: riportare il regolatore sullo «0».
- resistente a pressioni (fino a 0,5 bar).
- l'anello sulla maniglia serve come portatubo.

#### Istruzioni per l'uso:

1. Girare la manopola del regolatore in ambedue le direzioni per canellare la posizione precedente. Portare il regolatore sullo «0». Aprire il morsetto scorrevole.
2. Preparare l'infusione come al solito. Infilare lo spinotto della Intrafix® Air con la presa d'aria chiusa nel recipiente dell'infusione.
3. Posizionare il livello del liquido nella camera di gocciolamento. Aprire la presa d'aria. Posizionare il regolatore sul «max.» e riempire la linea d'infusione senza bolle d'aria.
4. Togliere il cappuccio del raccordo Luer Lock. Stabilire il collegamento col paziente.
5. Regolare la portata desiderata a ritroso partendo dalla posizione «max.» sul contrassegno dell'impugnatura (I valori sulla scala sono valori d'approssimazione e devono controllati in funzione della densità del liquido).