

EZCOVER® Guida rapida

Set generico con coprisonda per sonda ecografica



1 Aprire il sacchetto e scartare il set



2 Individuare la piega centrale della coprisonda di protezione cercando l'adesivo «Hand here»



3 Inserire la mano nella coprisonda



4 a Applicare una piccola dose di gel sterile sulla coprisonda di protezione (a) o sulla sonda (b)



5 a Prendere il trasduttore ecografico (a*) o farselo passare (b)
*Attenzione: «probe here» è visibile soltanto per le versioni STOP



6 Tirare la coprisonda sul trasduttore e sul cavo (adesivo «Pull here»)



7 Fissare con l'aiuto degli elastici



8 Effettuare il time out e rimuovere l'adesivo (soltanto per le versioni STOP)



9 a Per immagini ecografiche nitide assicurarsi che non ci siano bolle d'aria sotto alla coprisonda

