



# Askina® Barrier Cream

Langzeit-Hautschutz-Creme für sensible und irritierte Haut

# Askina® Barrier Cream

Bildet einen lang anhaltenden Schutzfilm vor Körperflüssigkeiten

## Einsatzgebiete

- Verwendung auf intakter Haut
- Für sensible, fragile oder trockene Haut
- Schutz von intakter Wundumgebung

## Indikationen

- Hautschutz bei Urin- oder Stuhl-Inkontinenz
- Hautschutz vor aggressiven Körperflüssigkeiten
- Prophylaxe gegen Hautreizungen, die durch Kleber oder Verbände verursacht werden

## Anwendungstipps

Die Haut sollte vor der Applikation bei Bedarf gereinigt und sorgfältig getrocknet werden. Askina® Barrier Cream nur dünn auf die betroffene Stelle auftragen. Fühlt sich die Haut ölig an, wurde zuviel Creme aufgetragen. Überschüssige Creme einfach abwischen. Askina® Barrier Cream darf nicht auf infizierter Haut angewendet werden.



Artikel	Art.-Nr.	Pharmacode
Askina® Barrier Cream 92 g	5038	1098785

## Anwendungsbeispiele



Langzeit-Hautschutz bei Urin- oder Stuhl-Inkontinenz



Schutz vor weiteren Hautschäden durch starke Reibung bei Inkontinenz-Patienten



Schutzbarriere gegen aggressive Klebstoffe: bei trockener und fragiler Wundumgebung wird die intakte Haut geschützt und mit Feuchtigkeit versorgt



Schutzfilm in Hautfalten zur Prophylaxe gegen Hautirritationen, die durch Schweiß verursacht werden können