

Perifix® Katheter Fixierung

DIE EINFACHE ART, EINEN KATHETER ZU FIXIEREN

Perifix® Katheter Fixierung

SICHERHEIT UND KOMFORT FÜR PATIENTEN

Die Perifix® Katheter Fixierung kombiniert einfache Handhabung mit erhöhter Kathetersicherheit. Sekundäre Katheterbewegungen lassen sich einfach vermeiden. Die Punktionsstelle kann untersucht werden, ohne dass das Risiko besteht, den Katheter während der Verweildauer zu verschieben.

Alles, was Sie für eine einfache und sichere Fixierung benötigen – **Perifix® Katheter Fixierung.**



Einfache Untersuchung der Punktionsstelle dank den einzigartigen Eigenschaften der Schutzfolie



Flaches Design stellt hohen Patientenkomfort sicher

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- Fixierungsring:
 - Ermöglicht die sichere und einfache Fixierung zur Verhinderung von Katheterbewegungen
- Schutzfolie mit nicht-klebendem Mittelteil:
 - Ermöglicht komfortablen Schutz der Punktionsstelle
 - Kann ohne das Risiko einer Katheterablösung einfach ausgewechselt werden


Produkt	Art-Nr.	Verkaufseinheit
Perifix® Katheter Fixierung A	4511200	25
Schutzfolie für Perifix® Katheter Fixierung B	4511201	25




EINFACHE UND SICHERE HANDHABUNG




Ziehen Sie das Papier vom **Fixierungsring** ab.

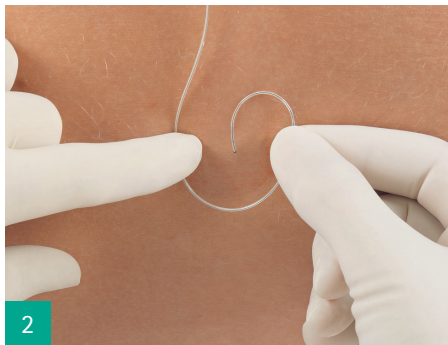

Bilden Sie mit dem Regionalanästhesiekatheter einen geeigneten Kringle um die Punktionsstelle.

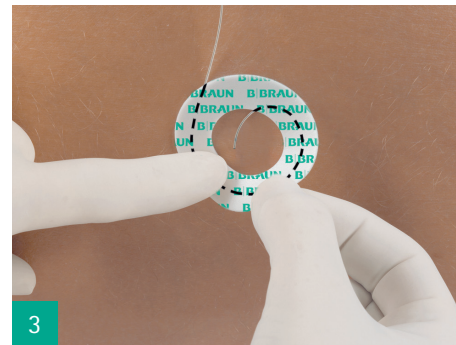


Kleben Sie den **Fixierungsring** auf den Katheter, um den Katheter zu fixieren.

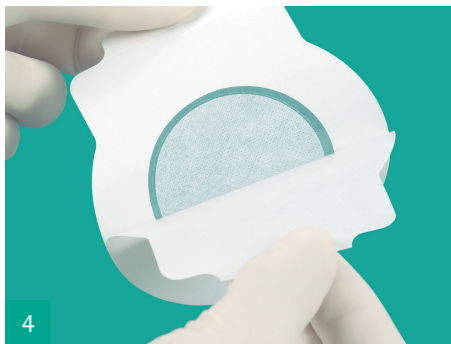

Ziehen Sie das Papier von der **Schutzfolie** ab.



Bringen Sie die **Schutzfolie** auf dem Fixierungsring an.

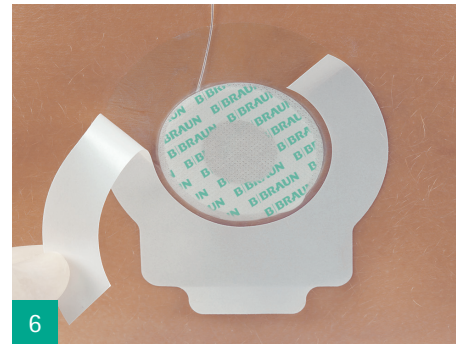

Lösen Sie das obere Papier der **Schutzfolie**.



Ziehen Sie das obere Papier vollständig von der **Schutzfolie** ab.



Die Punktionsstelle ist geschützt.

B. Braun Medical AG | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach
Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com | www.bbraun.ch