

# Fixation de cathéter Perifix®

Garantir sécurité et confort aux patients



Le moyen le plus simple de fixer un cathéter

# Fixation de cathéter Perifix®

Manipulation simple et sûre




1

Retirez le papier de l'anneau de fixation.



2

Enroulez convenablement le cathéter d'anesthésie régionale autour du site de ponction.

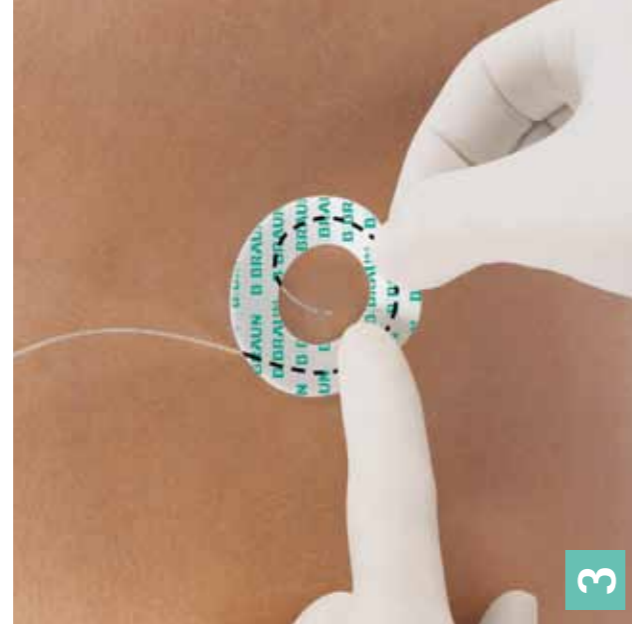

3

Appliquez l'anneau de fixation sur le cathéter ; il est maintenant immobilisé.




4

Retirez le papier de la feuille de protection.



5

Appliquez la feuille de protection sur l'anneau de fixation.

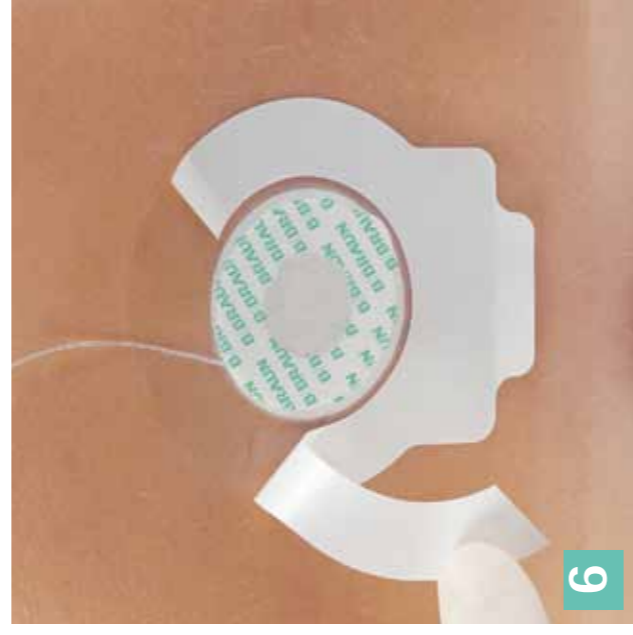

6

Découlez le papier supérieur de la feuille de protection.



7

Retirez entièrement le papier supérieur de la feuille de protection.



8

Le site de ponction est protégé.

## Avantages pour l'utilisateur

- **Anneau de fixation :**  
garantit une fixation simple et sûre afin de prévenir toute migration du cathéter.
- **Feuille de protection avec centre non-adhésif :**
  - assure une protection tout confort du site de ponction ;
  - peut facilement être remplacée sans risquer de déplacer le cathéter.

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

# Fixation de cathéter Perifix®

La fixation de cathéter Perifix® allie manipulation simple et sécurité renforcée du cathéter.

Les migrations secondaires du cathéter peuvent être aisément évitées. L'examen du site de ponction est possible sans risquer de déplacer le cathéter pendant la durée d'implantation.

La fixation de cathéter Perifix® : tout ce dont vous avez besoin pour une fixation simple et sûre.



Un examen facile du site de ponction grâce aux caractéristiques de la feuille de protection.

Une conception plate qui assure au patient un confort optimal.



Anneau de fixation



Feuille de protection avec centre non-adhésif

## Avantages pour l'utilisateur

- **Anneau de fixation :** garantit une fixation simple et sûre afin de prévenir toute migration du cathéter
- **Feuille de protection avec centre non-adhésif :**
  - assure une protection tout confort du site de ponction
  - peut facilement être remplacée sans risquer de déplacer le cathéter

Produit	N° réf. (REF)	Unité de vente
Fixation de cathéter Perifix®	4511200	25
Protection pour fixation de cathéter Perifix®	4511201	25