


Sangofix® – Modernste Applikation von Blut und Blutprodukten

Hygienische und einfache Handhabung


1 VORBEREITUNG DER BLUTTRANSFUSION



Bereiten Sie die benötigten Produkte für die Bluttransfusion vor, z.B. Sangofix®, Blutkonservenbeutel, Softa® Cloth, SwabCap®, Combi-Stopper, Omniflush® sowie eine Instrumentenwanne für das zu entsorgende Material.

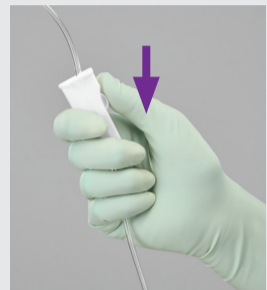

Schliessen Sie anschließend die Rollenklemme.

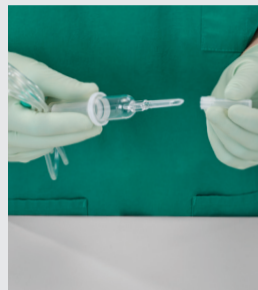

Entfernen Sie die Schutzkappe vom Einstichdorn.



Einstichdorn in den Port des Blutbeutels einstechen.* Der weiße Ring dient als Fingerstopper.

* Falls notwendig, desinfizieren Sie den Port des Blutbeutels.

2 ENTLÜFTEN DES BLUTTRANSFUSIONSBECKENS



Hängen Sie den Blutbeutel an einen Ständer und befestigen Sie den Patientenanschluss an der entsprechenden Vorrichtung der Rollenklemme. Drücken Sie das Tropfkammer-Unterteil vorsichtig zusammen und bringen Sie das Flüssigkeitsniveau auf Höhe des weißen Rings.



PRIMESTOP VERMINDERT DEN BLUTKONTAKT

Öffnen Sie die Rollenklemme und entlüften Sie Sangofix® vollständig.




Schliessen Sie anschließend die Rollenklemme.



Spin-Lock® Konnektor mit PrimeStop


- Die mit einer hydrophoben, bakteriendichten Membran ausgekleidete Schutzkappe verhindert den Austritt von Blut beim Entlüftungsvorgang
- Der Rotationsadapter des Spin-Lock® Konnektors verhindert das Verdrehen der Infusionsleitung während des Anschliessens

3 VERBINDUNG MIT DEM PATIENTENZUGANG

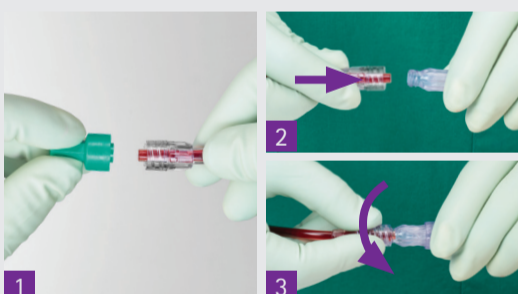


Entfernen Sie die PrimeStop-Kappe. Ziehen Sie dann den Adapter des Spin-Lock® Konnektors nach hinten, um seine Rotationsfunktion zu aktivieren. Schieben Sie den Adapter nach vorne und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn auf die Caresite® Verlängerungsleitung.

4 BEGINN DER BLUTTRANSFUSION

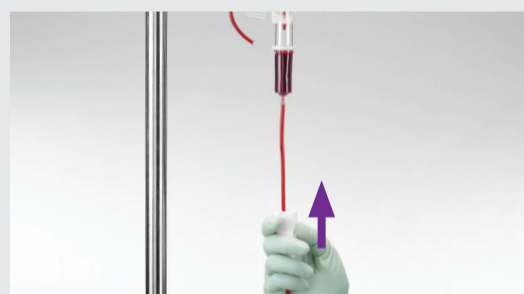

Öffnen Sie die Rollenklemme und stellen Sie die Flussrate ein.* Kontrollieren Sie die Flussrate während der Transfusion. Zum Stoppen oder Unterbrechen der Transfusion schliessen Sie die Rollenklemme.


* Bei Verwendung von Glasflaschen und Sangofix® Air: Belüftungskappe öffnen.

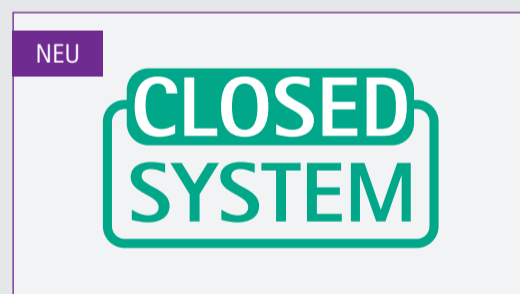

Geschlossenes System


Die PrimeStop-Kappe von Sangofix® verhindert den Austritt von Lösungen oder Verunreinigungen in die angrenzende Umgebung und schafft daher gemäss der Definition des NIOSH von 2004 ein geschlossenes System.¹

5 ABKOPPELN

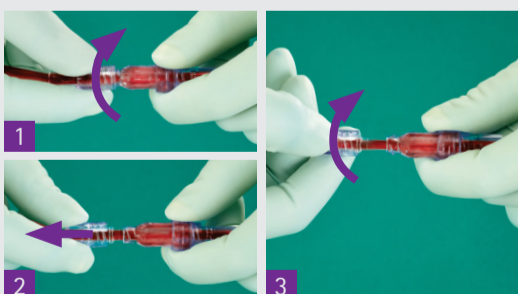

Lösen Sie den Adapter des Spin-Lock® Konnektors, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen. Ziehen Sie den Adapter dann bis zum Anschlag zurück. Drehen Sie den Adapter gegen den Uhrzeigersinn und lösen Sie so das Besteck von der Caresite® Verlängerungsleitung.

6 NACH DEM ABKOPPELN

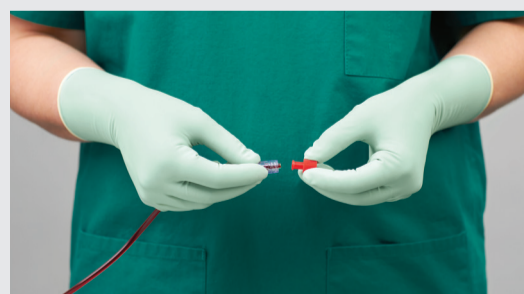

Verschliessen Sie Sangofix® mit einem Combi-Stopper.



Spülen Sie die Caresite® Verlängerungsleitung mit Omniflush® und setzen Sie die SwabCap® aseptisch auf Caresite® auf, um eine kontinuierliche Desinfektion der Ventiloberfläche sowie eine physische Barriere für Kreuzkontaminationen sicherzustellen.

LITERATUR | 1. Quality Labs Biomaterial Testing: Testbericht: Uranin-Dichtigkeitsprüfung der PrimeStop-Kappe von Sangofix®