



AVEC PORT EN
SILICONE POUR
EXAMEN SANS
AIGUILLES

Ureofix[®] 500 classic

PLUS DE SÉCURITÉ SYSTÉMIQUE

SYSTÈME DE MESURE DE L'URINE FERMÉ

Ureofix[®] 500 classic

PLUS DE SÉCURITÉ SYSTÉMIQUE

B. Braun peut regarder en arrière sur presque 40 années d'expérience dans la fabrication et la commercialisation de systèmes de mesure de l'urine. Les systèmes de mesure de l'urine de B. Braun possèdent un degré de connaissance élevé de par le monde, en médecine intensive et bénéficient d'une haute acceptation auprès des médecins et du personnel soignant.

Nos produits de mesure de l'urine ont toujours fourni une contribution importante auprès du quotidien hospitalier, du personnel soignant et des patients. Les infections urinaires, en tant que cause essentielle des infections nosocomiales peuvent être réduites, le déroulement des tâches dans les hôpitaux simplifié et la sécurité d'utilisation élevée.

B. Braun se place pour cela au premier rang parmi les fabricants dominants de systèmes de mesure de l'urine ; elle est appréciée dans le monde entier par les clients et les utilisateurs. Notre nouvel Ureofix[®] 500 classic réévalué renoue avec cette tradition.

Plus de sécurité et de confort ont été la stimulation pour le redéveloppement du système de mesure Ureofix[®] 500 classic. Les caractéristiques du produit offrent les avantages suivants à l'utilisateur :

- Risque d'infection réduit
- Supervision exacte
- Prélèvement pour examen sans aiguilles
- Meilleure vidange du récipient
- Suspension simple et sûre
- Exempt de latex et de DEHP



RISQUE D'INFECTION RÉDUIT

Pas de filtre mouillé



Deux filtres d'aération protégés dans la chambre pour gouttes et le réservoir de mesure

Risque d'infections urinaires diminué

Le tronçon sec entre le tuyau de transfusion et le réservoir de mesure empêche une migration rétrograde des bactéries


Empêchement d'un reflux de l'urine

- La soupape antireflux intégrée empêche le reflux de l'urine dans le tuyau de transfusion et ainsi dans la vessie du patient
- La soupape antireflux est normalement ouverte et ne se ferme qu'en cas de reflux de l'urine hors du récipient

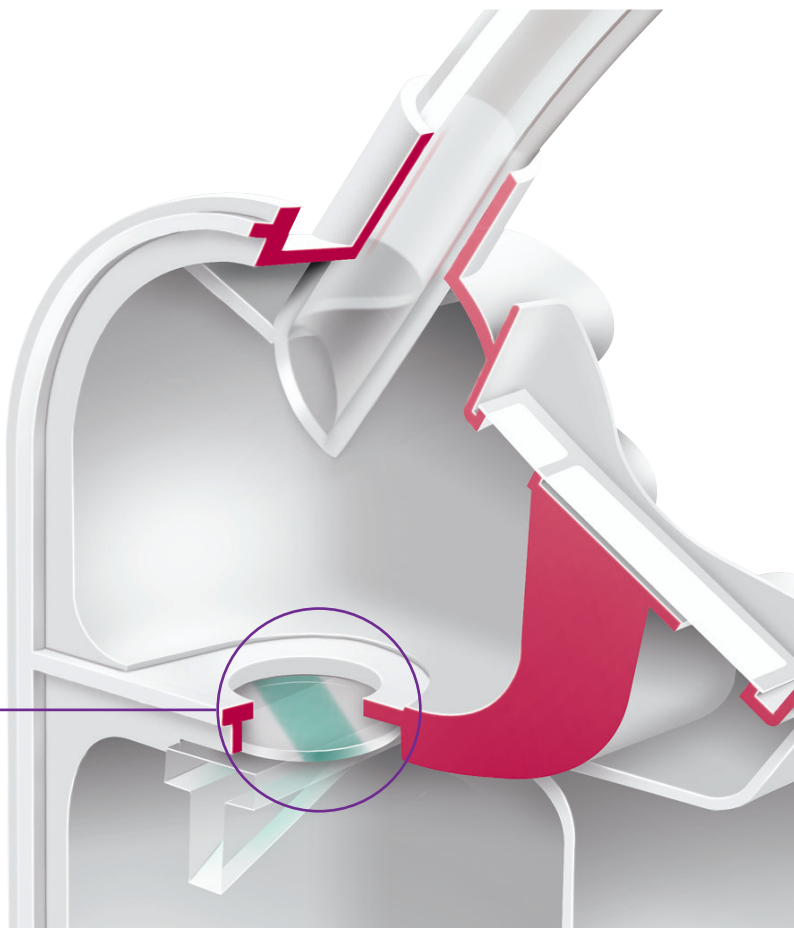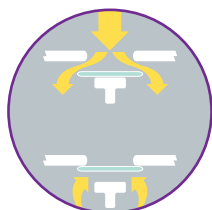

SUPERVISION EXACTE

- L'échelle précise de la chambre de mesure permet une supervision exacte
- Chambre de mesure fine supplémentaire pour la mesure de l'évacuation de l'urine chez les enfants aussi

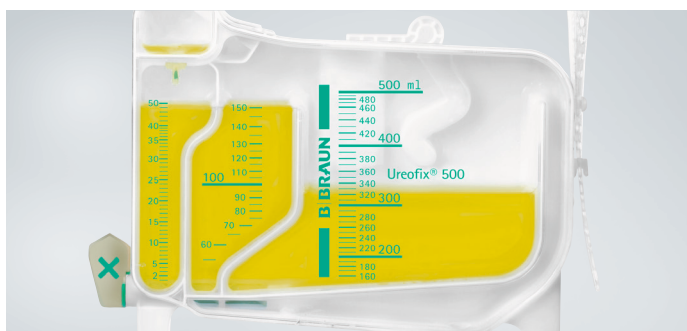

PRÉLÈVEMENT POUR EXAMEN SANS AIGUILLES

Toutes les versions d'Ureofix® 500 classic sont équipées d'un cône à échelon avec un port de silicone se refermant de manière étanche pour le prélèvement pour examen sans aiguilles (au moyen de seringue avec cône Luer) (des prélèvements avec canule sont aussi possibles)





Ureofix® 500 classic

LORSQUE CELA DOIT ALLER PLUS FACILEMENT ET PLUS LÉGÈREMENT



RECONNAISSANCE AISÉE DE LA DIRECTION DU FLUX

- La soupape tournante avec identification de la direction du flux permet une vidange plus facile
- Soupape tournante avec surface antidérapante et symboles explicites « croix » et « flèche »

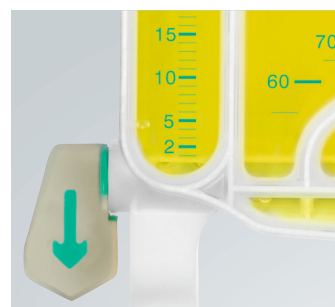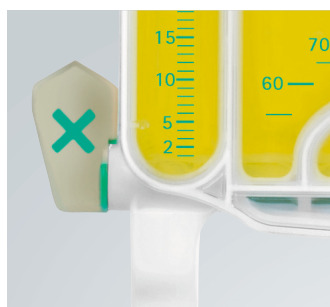


LIAISON ET ACCROCHAGE SÛRS

- La poche de recueil est attachée solidement et avec sécurité par une connexion à baïonnette ayant fait ses preuves
- De nouveaux œillets de suspension ronds renforcés facilitent un accrochage léger et sûr de la poche de recueil

Ureofix[®] 500 classic

VITE SUSPENDU ET FIXÉ AVEC SÉCURITÉ

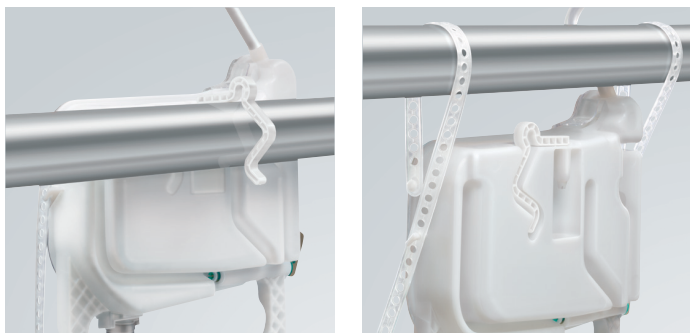

SUSPENSION FACILE ET SÛRE :

Pour la fixation d'Ureofix[®] 500 classic, les aides pour une fixation rapide suivantes sont à disposition :




- Un crochet amovible intégré au dos de la chambre de mesures
- Deux bandes trouées prémontées sur le côté de la chambre de mesures

Ou en plus, en option :

- Une bande de fixation, resp. une plaque de fixation basée sur le principe de cône et orifice, lequel est fixé auparavant au montant du lit pour y suspendre le système. La bande de fixation, resp. la plaque de fixation peuvent être désinfectées et ainsi rester sur le lit.

FIXATION AU MOYEN D'UNE BANDE DE FIXATION SELON LE « PRINCIPE CÔNE ET ORIFICE »

- 1 Bande de fixation avec orifice pour la fixation du système de mesure au montant du lit
 - Pour tendre fermement, la bande se tire de bas en haut à travers la fente de devant
 - Pour la libérer, on appuie sur le levier contre le bas et l'on retire la bande par-dessous
- 2 La bande de fixation avec orifice est accrochée au montant du lit et tendue fermement
- 3 Le cône au dos de la poche de recueil s'enfile dans l'orifice
- 4 Le système de mesure est suspendu verticalement et prêt à l'emploi sur le montant du lit, il peut facilement être modifié en tout temps

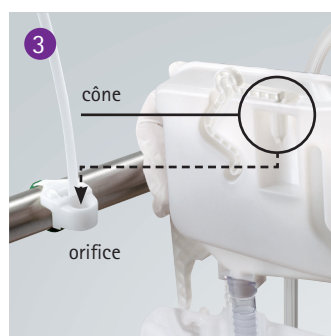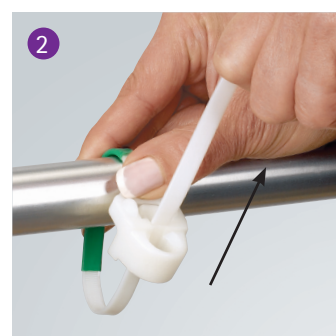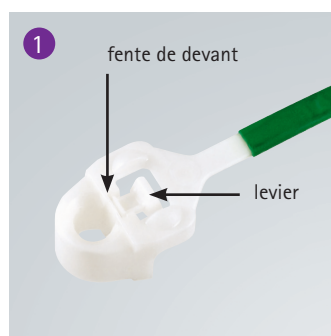


Ureofix[®] 500 classic

AVEC POCHE DE RECHANGE

SYSTÈME DE MESURE DE L'URINE AVEC POCHE DE RECHANGE DE 1.5 ET 3.5 LITRES

- La poche de recharge sans pince coulissante avec un raccord stable facilite la connexion et la déconnexion de la chambre de mesure
- Un système antireflux dans la poche de recharge empêche le reflux de l'urine dans la chambre de mesure, lors de la dépose sur le lit du patient ainsi que la sortie de l'urine après l'enlèvement de la chambre de mesure
- L'urine peut être versée après éloignement de la poche de recharge par l'entaille marquée (TEAR)

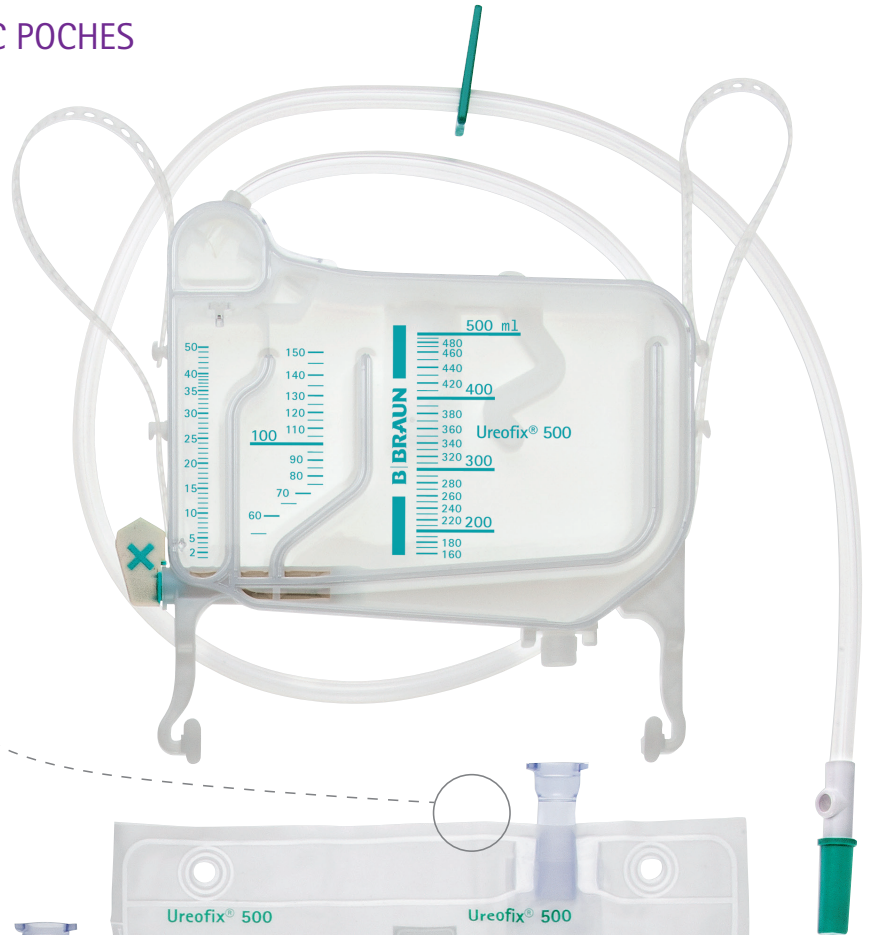


EXEMPT DE DEHP
EXEMPT DE LATEX

Ureofix[®] 500 classic

AVEC POCHE À ROBINET D'ÉVACUATION

SYSTÈME DE MESURE DE L'URINE AVEC UNE POCHE PRÉMONTÉE DE 2 LITRES AVEC ROBINET D'ÉVACUATION

- Le robinet de vidange avec arrêt empêche les fuites
- Le robinet de vidange en « position de parc » est en contact avec l'air et sèche ainsi rapidement
- La formation d'une chambre humide est empêchée, ainsi pas de croissance de bactéries

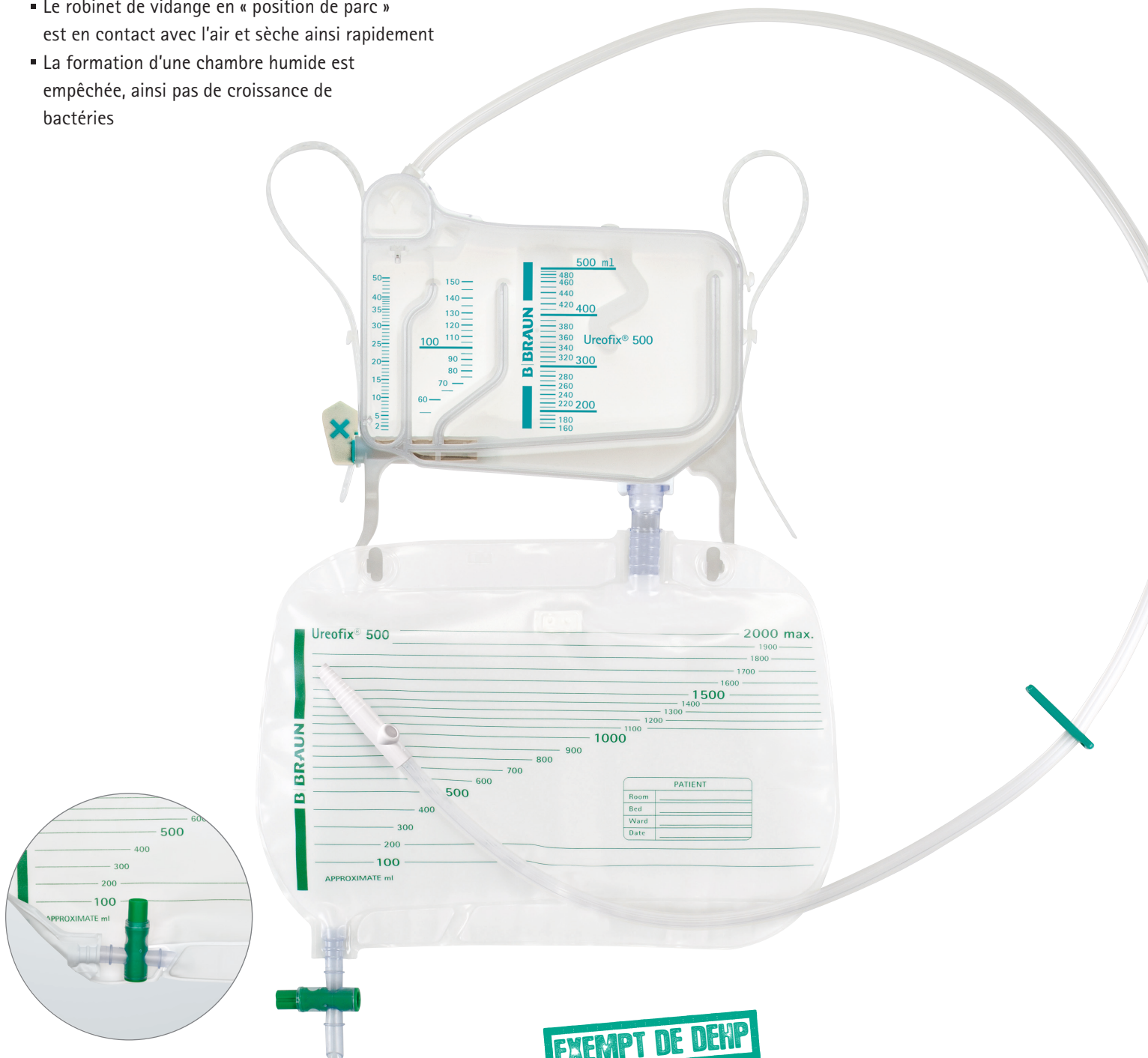

EXEMPT DE DEHP
EXEMPT DE LATEX

Ureofix[®] 500 classic

LIGNE COMMERCIALE ET ACCESSOIRES

Système de mesure de l'urine	Longueur du tuyau	Unité/pièce de vente	N° art.	Pharmacode
Ureofix [®] 500 classic avec poche de rechange 1.5 litres	120 cm	10 pièces	4417910	4580425
	170 cm	10 pièces	4417920	4580431
Ureofix [®] 500 classic avec poche de 2 litres prémontée et robinet d'évacuation	120 cm	10 pièces	4417930	4580448
	170 cm	10 pièces	4417940	4580454

Accessoires	Unité/pièce de vente	N° art.	Pharmacode
Poche de rechange 1.5 litres avec antireflux	100 pièces	4417535	5206829
Poche de rechange 3.5 litres avec antireflux	100 pièces	4417543	5180260
Poche de 2 litres avec robinet de vidange et antireflux	100 pièces	4417551	5180277
Bande de fixation « principe cône et orifice »	10 x 10 pièces	4417755	5206835
Plaque de fixation	25 pièces	4417780	-

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market : Tél. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market : Tél. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com